

Varování a bezpečnostní informace pro Duplo produkty

Verze 2 /květen 2025



Vaše bezpečnost a bezpečnost koní vašich (zákazníků) je pro nás důležitá.

Vzhledem k nařízení GPSR jsme komplexně rozšířili naše bezpečnostní pokyny, abychom vám poskytli co nejlepší informace.⇒ **Bezpečnostní pokyny pro manipulaci a aplikaci naleznete na stranách 1 až 12. Bezpečnostní pokyny pro každodenní použití naleznete na straně 1 a od strany 13 dále.**

Vzhledem k překrývání oblastí jsme přidali křížové odkazy

Na www.duplo-frank.de/en/safety-merchandise naleznete informace o produktech pro podkování podkov a péči o kopyta z naší nabídky.

Pokud si jezdec/majitel koně nezakoupí naše produkty přímo, ale prostřednictvím podkováře, je úkolem podkováře prodiskutovat tyto bezpečnostní aspekty používání našich produktů s jezdcem/majitelem koně a poskytnout mu komplexní informace.

OZNÁMENÍ

Práce na kopytech koňovitých je potenciálně nebezpečná, a proto by ji měli provádět pouze vyškolení odborníci.

Abyste minimalizovali rizika, zajistěte obecně bezpečné pracoviště, tj. kontrolujte také okolí a nepracujte „přitisknutě ke zdi“.

Dbejte také na používání osobních ochranných prostředků vhodných pro daný pracovní postup, dodržujte aktuální bezpečnostní předpisy pojištěven odpovědnosti zaměstnavatelů a používejte pouze testované vybavení a nástroje.

Všechny produkty musí být používány v souladu s pokyny a bezpečnostními informacemi uvedenými na našich webových stránkách. Úprava, úprava a použití pro konkrétní kopyto je vždy na uvážení podkováře na místě. Společnost H. Frank Kunststofftechnik GmbH se tímto zříká veškeré odpovědnosti za nesprávné použití produktů a za jakékoli ztráty vzniklé v důsledku použití jakéhokoli produktu popsaného v našem katalogu nebo na našich webových stránkách nebo v našich tištěných či digitálních návodech.

Neneseme žádnou odpovědnost za škody na osobách, zvířatech nebo majetku, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného nebo neopatrného použití, špatného řemeslného zpracování, nedbalosti při kontrole nebo riskantní jízdy.

Naše produkty nejsou určeny k diagnostice ani léčbě jakékoli nemoci.

2. Rizika při práci s našimi produkty:

Rady pro podkováře při podkování / lepení / kástování

Pojem „podkovář“ zahrnuje všechny osoby, které samy pracují na kopytech koňovitých nebo kteří manipulují s našimi produkty či je aplikují.

Veškeré práce s ortopedickým/terapeutickým pozadím smí provádět pouze vyškolení specialisté.

2.1. Rizika při práci s plasty

OOP !!! Zajistěte dostatečné větrání a vhodné osobní ochranné prostředky (OOP) jak při broušení, tak při svařování plastů.



OZNÁMENÍ Ne všechny plasty jsou stejné. Naše produkty jsou vyráběny s použitím chemických látek a syntetických materiálů, které jsou neškodné pro zdraví. Nicméně při práci s plasty je třeba zvážit řadu aspektů, které chrání vaše zdraví..

UPOZORNĚNÍ Při úpravě podkov nebo příslušenství nevdechujte žádný plastový brusný prach.
Abyste předešli zraněním, jako jsou popáleniny, nezapomeňte, že plast se při broušení nebo svařování plastů může zahřát až na 200 °C / 400 °F. Používejte vhodné ochranné prostředky, abyste se chránili před potenciálním nebezpečím.
Zabraňte spalování plastového materiálu, abyste nevdechovali žádné výpary, a nekládejte žádné plastové výrobky do kovací pece..
Při provádění jakýchkoli svářečských prací se ujistěte, že svarové švy jsou souvislé a stabilní a že svarový šev nevyvíjí žádný tlak na citlivá místa kopyta..

ODKAZ Při práci s úhlovou bruskou, pásovou bruskou nebo horkovzdušnou bruskou dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření. Pro naše svářečí nástroje platí samostatné pokyny: www.duplo-frank.de/Dateien/device-safety-eng.pdf

2.2. Obecné informace o práci s našimi produkty

OZNÁMENÍ Naše produkty používejte pouze tehdy, máte-li potřebné znalosti o jejich správném používání.

Dodržujte naše pokyny pro podkování a bezpečnostní informace.

Při práci s našimi produkty používejte pouze nástroje určené k tomuto účelu.

Při práci s těmito nástroji dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření a veškeré další bezpečnostní a uživatelské pokyny uvedené výrobcem.


Nevkládejte podkovu Duplo mezi kopyto a běžnou podkovu. Nevkládejte podkovu Duplo pod ocelovou podkovu. To platí jak pro čistě plastové podkovy, tak pro kompozitní podkovy.





UPOZORNĚNÍ

Nesprávné velikosti podkovy nebo nedostatečné přizpůsobení podkovy kopytu může zvýšit riziko ztráty podkovy koně. Ať už jsou ztracené podkovy lepené, slité nebo přibité, představují vždy bezpečnostní riziko pro vašeho vlastního koně i celé stádo.

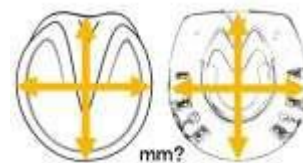

ODKAZ

Veškeré informace o úpravách a úpravách naleznete online::
www.duplo-frank.de/en/faq-adjustment

2.3. Nebezpečí zranění od postranních čapek

OOP !!! Pokud používáte podkovu se postranními čapkami, dbejte na to, abyste se nepořezali. Doporučujeme používat vhodné rukavice. Při broušení/odstraňování čapek je nutná vhodná ochrana očí..

UPOZORNĚNÍ Při podkování dbejte na to, abyste upravili čapky podle úhlu kopyta. Vyčnívající čapky zvyšují riziko zranění koně i stáda.

Pokud používáte model „Basic“, před podkováním čapky zbrouste, abyste předešli zranění.

Při broušení nebo odstraňování čapek může docházet k jiskření.

Dodržujte příslušná bezpečnostní opatření a noste odpovídající osobní ochranné prostředky, zejména vhodnou ochranu očí.



2.4. Riziko bolesti v důsledku nesprávně umístěných mikrohrotů


OZNÁMENÍ Robustní barevné mikrohroty se zatlačí do nosné hrany kopytní stěny a pomáhají zabránit kroucení přibité podkovy na kopytě.

UPOZORNĚNÍ Pokud poloha mikrohrotů na kopytě není ideální, může to vést k tlaku na citlivá místa.
Proto vždy dbejte na jejich správnou polohu na kopytě a obrouste všechny nesprávně umístěné výstupky.

2.5. Další rizika spojená s přibitou podkovou

ODKAZ Veškeré relevantní informace naleznete v našem návodu: www.duplo-frank.de/en/shoeing-instruction

UPOZORNĚNÍ Ujistěte se, že jste si vybrali správné hřebíky do podkov. Je důležité, aby hlavička hřebíku nemohla proklouznout otvorem v podkově.
Jinak se zvyšuje riziko, že kůň ztratí podkovu.

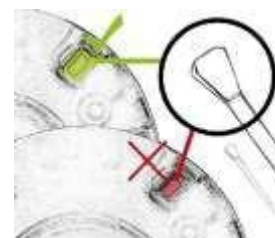

VAROVÁNÍ Čistě plastová podkova „**Classic**“ bez kovové vložky (bez ohledu na variantu) nebyla vyvinuta pro přibíjení
Riziko ztráty podkovy a poranění hřebíky by bylo příliš vysoké, protože hřebíky by v plastu nedržely pevně..

2.6. Další rizika spojená s nalepovací podkovou


OZNÁMENÍ Náš sortiment zahrnuje tzv. „cvičné sady“ pro nácvik svařování lepených manžet a podkov za nízkou cenu. Upozorňujeme, že „figuríny“ obsažené v sadách nejsou vhodné jako ochrana kopyt.

2.6.1. Zvýšené zdravotní riziko v důsledku použitého lepidla

OOP!!! Bez ohledu na to, jaké lepidlo používáte: Ujistěte se, že máte vhodné osobní ochranné prostředky a dostatečné větrání.

UPOZORNĚNÍ Přečtěte si a dodržujte varování a bezpečnostní pokyny pro použité lepidlo. Pokud si lepidlo zakoupíte od nás, přiložíme varování a bezpečnostní pokyny samostatně k zásilce, pokud nejsou uvedeny na samotném výrobku.

ODKAZ Informace naleznete také online v popisu výrobku:
www.duplo-frank.de/en/nailless/instant-adhesive

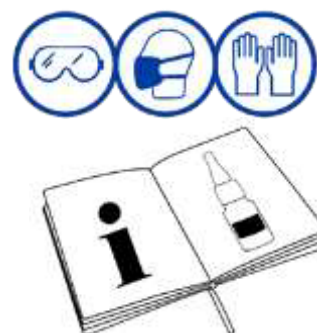

2.6.2. Minimalizované riziko ztráty podkov při správných pracovních postupech

OZNÁMENÍ Aby se snížilo riziko ztráty nalepené podkovy, je důležité pečlivě připravit holé kopyto a nalepenou podkovu.

ODKAZ Veškeré relevantní informace pro tento styl obouvání naleznete v našem návodu k lepení: www.duplo-frank.de/en/glueing-instruction

2.6.3. Minimalizované riziko ztráty podkov díky odstraněným mikrohrotům

OZNÁMENÍ Toto platí jak pro tvrdé mikrohroty barevných vložek, tak i pro měkké výstupky související s výrobou

TIP Všechny modely **Laminitis**, **Basic**“, stejně jako naše podkovy pro pony nemají žádné mikrohroty.

UPOZORNĚNÍ Pro jistotu předem odstraňte **všechny** mikrohroty. Pokud mikrohroty při lepení ještě zcela nepronikly rohovinou kopyta, mohou se později stlačit, což by mohlo negativně ovlivnit bezpečné uchycení lepené podkovy.



2.6.4. Minimalizované riziko ztráty podkov: lepicí manžety a lepicí límce

UPOZORNĚNÍ V závislosti na lepicí manžetě nebo lepicím límci si můžete vybrat mezi různými stupni tvrdosti. Stupeň tvrdosti plastu má vliv na odolnost produktu proti roztržení a jeho flexibilitu při lepení na kopyto. V závislosti na teplotě, stěně kopyta a jezdecké disciplíně se proto mohou vyskytnout problémy. Za rozhodnutí, který produkt k lepení použít, je zodpovědný podkovář.

2.6.4.1. Flexibilita manžet

OZNÁMENÍ Čím tvrdší plast, tím obtížnější je ohýbat jednotlivé jazýčky na kopytě. Proto může být rozumné zvolit o něco měkčí syntetický materiál, zejména pokud mají stěny kopyta nepravidelný tvar.

VAROVÁNÍ Čím silnější jsou síly působící na lepený spoj, tím větší je riziko ztráty podkovy.

TIP U tvrdších produktů může být užitečné před použitím trochu zahřát jazýčky, které již byly k podkově přivařeny, a nechat podkovu na nich několik minut ležet, například zatíženou kladivem. Tím se jazýčky ohnou směrem ke stěně kopyta.



2.6.4.2. Zátěž způsobená jezdeckou disciplínou / mechanikou chůze koně

VAROVÁNÍ Čím měkčí plast, tím snáze se jednotlivé jazýčky odtrhnou.


V jezdeckých disciplínách, kde je ochrana kopyt vystavena obzvláště vysokým a střihným pohybům (např. všestrannost, parkur, dostihy) se riziko ztráty podkovy zvyšuje s klesající tvrdostí použitého syntetického materiálu.



2.6.4.3. Vliv teplot

VAROVÁNÍ Při vyšších teplotách se plast stává měkčím a pružnějším. Měkčí výrobky se proto v létě trhají rychleji než tvrdší. V létě důrazně nedoporučujeme používat měkké nebo standardní verze.

Při nižších teplotách se plast stává tužším a méně pružným. Čím je výrobek tvrdší, tím méně je pružný v zimě (viz 2.6.4.1).

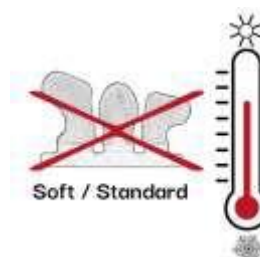

2.6.5. Zvýšené riziko ztráty podkov v důsledku používání produktů pro péči o kopyta

VAROVÁNÍ Přípravky na péči o kopyta obsahující olej, které se nanášejí na stěnu kopyta, mohou narušit adhezni spojení mezi nalepovacími manžetami a kopytem. To zvyšuje riziko ztráty podkovy.

TIP Proto vždy doporučujeme včas přerušit aktivní ošetření příslušným přípravkem před aplikací samolepicí podkovy.

ODKAZ Viz také bod 2.7.1.



2.6.6. Zvýšené riziko ztráty podkov kvůli výplňovému materiálu

VAROVÁNÍ Ujistěte se, že žádný výplňový materiál neuniká do strany směrem k nalepeným jazýčkům. Výplňový materiál by mohl mít negativní vliv na stabilitu lepeného spoje mezi jazýčkem a kopytem.

ODKAZ Viz také oddíl 2.7.1.

2.7. Další rizika spojená s ortopedickou/terapeutickou podkovou

POZOR Jakékoli podkování s ortopedickým/terapeutickým pozadím vyžaduje odpovídající odborné znalosti.

Nesprávná ochrana kopyta nebo nedostatečná opatření mohou zhoršit zdravotní stav koně.

OZNÁMENÍ Naše produkty nejsou určeny k diagnostice ani léčbě jakékoli nemoci..

2.7.1. Používání produktů pro péči o kopyta, výplňových materiálů a produktů pro opravu kopyt

OOP !!! Mnoho z těchto produktů může představovat riziko pro vaše zdraví a vyžaduje osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice a ochrana úst a očí. Vždy zajistěte dostatečné větrání.



POZOR Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny výrobce k použití, abyste chránili své zdraví a zdraví koně. V závislosti na individuální situaci může nesprávný přípravek na péči o kopyta nebo nesprávný stupeň tvrdosti výplňového materiálu zhoršit zdravotní stav koně. Je odpovědností podkováře vybrat správný produkt.

ODKAZ Viz také oddíl 2.6.5. a 2.6.6.

2.7.2. Rizika spojená s podkovami Laminitis

OZNÁMENÍ Naše modely s otevřenou špicí se také často označují jako „podkovy Laminitis“.

Samozřejmě, v závislosti na koni a individuální situaci kopyta, jsou vhodné i jiné podkovy pro použití jako podkovy pro laminitidu.

POZOR Pokud chcete používat naše produkty pro akutní nebo chronickou laminitidu, důrazně doporučujeme absolvovat vhodné školení a spolupracovat s příslušným veterinářem. Nesprávný výběr velikosti/modelu podkovy nebo její úprava může situaci koně zhoršit.

2.7.3. Rizika spojená s klínovými podložkami

OZNÁMENÍ Jedná se o ortopedickou/terapeutickou podkovu, kterou smí používat pouze zkušení podkováři.

POZOR Podkova s klínovou opěrkou se používá ke změně úhlu kopyta.

Doporučujeme, abyste se vždy poradili s veterinářem o použití klínu, úhlu, pod kterým by měly být patky zvednuty, a délce používání.



UPOZORNĚNÍ Bez odpovídajících odborných znalostí a individuálně přizpůsobeného tréninku to může mít negativní dopad na pohybový aparát a zdraví koně.

2.7.4. Rizika spojená s kastovanými podkovami

OOP!!! Pokud chcete koně podkovat litými podkovami, používejte vhodné ochranné rukavice.



Při přípravě a aplikaci litých tyčí potřebujete ochranu před ostrými hroty litých háků, abyste zabránili pořezání.

Při broušení šroubů je nutná vhodná ochrana očí.

Při práci se sádrovým obvazem budete potřebovat jednorázové rukavice.

Varování a bezpečnostní informace pro Duplo produkty

Verze 2 /květen 2025



ODKAZ

Veškeré relevantní informace z naší strany pro tento styl podkovy naleznete v našem návodu k použití sádry: www.duplo-frank.de/en/nailless/cast-hooks

Dodržujte prosím také bezpečnostní pokyny výrobce sádrových ob vazů.

VAROVÁNÍ

Jedná se o ortopedické/terapeutické podkování, které smí provádět pouze zkušený podkovář (v případě potřeby ve spolupráci s veterinářem), aby se zajistilo, že sádrovaná podkova nebude mít na koně žádné negativní zdravotní účinky.

Upozorňujeme, že sádrování kopyta vede k znehybnění rohovinového pouzdra.

Doba trvání této aplikace by proto měla být přizpůsobena individuální situaci koně.

Při omotávání kopyta sádrovým obvazem se ujistěte, že koronární pás a pateční bulby zůstanou volné.

Při broušení vyčnívajících šroubů může docházet k jiskření. Dodržujte příslušné bezpečnostní opatření a noste odpovídající osobní ochranné prostředky, zejména vhodnou ochranu očí.




2.7.5. Rizika spojená s vysokými ozuby

POZOR

Závitové vložky modelů „Jumper“ a „HDS“ jsou obecně vhodné pro mírně vyšší ozuby. Pokud však podkovy používáte pro ortopedické/terapeutické podkování, obecně nedoporučujeme používat vysoké ozuby.

Totéž platí pro podkovy s otevřenou špičkou a závitem.

V tomto případě doporučujeme používat pouze ozuby o průměru 6 mm nebo 8 mm s efektivní výškou 3 mm nebo 5 mm, aby se zabránilo dalšímu zatížení zdravých koně.

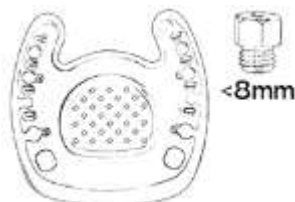

ODKAZ

Viz také oddíl 2.8 se všemi pododdíly .

2.8. Rizika spojená s použitím ozubů

POZOR

Jakékoli použití ozubů zvyšuje riziko zranění ve stádě.
Výhody a nevýhody použití podkov by proto měly být dohodnuty mezi podkovářem a majitelem koně/jezdcem (a případně i majitelem stáje)



2.8.1. Poloha závitových vložek (otvorů pro čepy) na kopytě

UPOZORNĚNÍ

Správná poloha pro závitové vložky je v oblasti patky.
Pokud používáte podkovu se čtyřmi závitovými vložkami, musí být dvě přední závitové vložky umístěny pod nosnou hranou kopytní stěny.
Při výběru správného tvaru a velikosti podkovy s otvory pro čepy vždy věnujte pozornost poloze závitových vložek.
Nesprávně umístěné závitové vložky mohou zvýšit riziko uvolnění podkovy a/nebo vyvíjet nežádoucí tlak na citlivé oblasti kopyta.



2.8.2. Použití závitové podkovy bez ozubů

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili bodovému tlaku na kopyto a neomezili stabilitu závitové vložky, chraňte závitové vložky před usazováním nečistot pomocí záslepek.



2.8.3. Závitové vložky ukotvené pouze v syntetickém materiálu

POZNÁMKA

U těchto podkov jsou 4mm cvočky s diskem nejvhodnější pro zdraví koně a stabilitu podkovy.

Naše 6mm ozuby s kotoučem jsou vhodné pouze omezeně, v závislosti na podmínkách terénu.
Nikdy nepoužívejte vyšší ozuby, protože by se závitové vložky mohly vypáčit a vychýlit ze své polohy.

UPOZORNĚNÍ



Nepoužívejte kolíky bez kotouče, abyste zabránili bodovému tlaku na kopyto.

UPOZORNĚNÍ

O něco vyšší „severské“ ozuby jsou vyvinuty výhradně pro severské země. U těchto kolíků je nutné vždy zajistit, aby se ozub mohl zcela zabořit do země. Jinak by použití těchto ozubů mohlo dlouhodobě ovlivnit stabilitu podkovy a zdraví koně.

Podkovy se závitovými vložkami, které nejsou ukotveny v kovovém jádru, nejsou vhodné pro opakované výměny ze záslepek (viz 2.8.2.) za ozuby.

Opakované šroubování a odšroubování (záslepek) ozubů ohrožuje pevné uchycení závitových vložek v podkově.




2.8.4. Závitové vložky v kovovém jádru

UPOZORNĚNÍ

Závitové vložky, které jsou pevně ukotveny v kovovém jádru, jsou obecně vhodné pro mírně vyšší ozuby. Pokud je však terén tvrdý a podkova se nemůže zabořit, domníváme se, že vyšší ozuby by se měly používat pouze v nezbytných případech.

Trvalé používání vyšších ozubů může mít negativní vliv na zdraví koně, stabilitu podkovy a bezpečnost stáda, zejména na tvrdém terénu. Nepoužívejte ozuby, které jsou vyšší než velikosti, které jsou u nás k dispozici a specifikovány pro vaši podkovu.

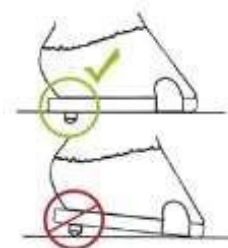

2.8.5. Použití ozubů pro ortopedické/terapeutické podkovy

ODKAZ

Viz oddíl 2.7.5.

2.9. Nebezpečí zranění při použití mikroozubů

POZOR

Hroty zvyšují jak přilnavost podkovy, tak i riziko zranění ve stádě – ale samozřejmě v jiné míře než hroty.

Jsou srovnatelné s wolframkarbidovými kolíky v běžných podkovách.

POZNÁMKA

Přesné umístění a počet hrotů použitých v plastovém materiálu je na uvážení podkováře.


V zásadě se možnosti liší v závislosti na použitém typu podkovy.

UPOZORNĚNÍ

Hroty jsou vhodné pouze v kombinaci s kompozitní podkovou se syntetickým potahem nebo čistě syntetickou podkovou.

Hroty nejsou vhodné pro použití v ocelových podkovách.

Hroty se nesmí šroubovat přímo do kopyta.

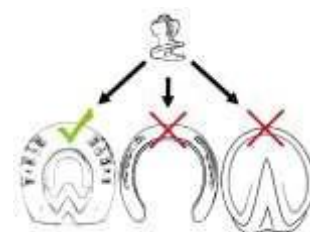

2.9.1. Riziko v důsledku nesprávné instalace / polohy mikroozubů

UPOZORNĚNÍ Aby se zabránilo tlaku na citlivé oblasti kopyta, měly by být mikroozuby upevněny v plastovém krytu v oblasti nosné hrany kopytní stěny.

Mikroozuby by za žádných okolností neměly být zašroubovány příliš dovnitř, tj. pod chodidlem kopyta. Pokud je hrot příliš blízko okraje podkovy, plast se může vytrhnout.

Pokud není hrot zašroubován dostatečně hluboko, snadno se ztratí a představuje také riziko zranění lidí a koní.

Pokud je hrot zašroubován příliš hluboko, neposkytuje žádný dodatečný úchop a hrozí, že se závit hrotu protrhne kopytní stranou podkovy.



2.10. Používání Sole Protector

POZNÁMKA Odstraňte ochranný límec proti nečistotám co nejpřesněji. Pokud odříznete příliš mnoho materiálu, háčky Sole Protectoru se nemusí později správně zachytit, což by instalaci ztížilo. Při instalaci používejte osobní ochranné prostředky a zajistěte dostatečné větrání.

Svarový šev musí probíhat bez mezer po celém okraji Sole Protectoru, aby byla zajištěna stabilita.

UPOZORNĚNÍ Rizika způsobená nestabilními svarovými švy:

- Mohlo by dojít k vniknutí nečistot, což může vést k nežádoucímu nárůstu tlaku.
- Ztráta Sole Protectoru

2.11. Používání podložky Duplo Univesal

POZNÁMKA Naše ochranné podložky jsou vložky do ocelových podkov.

Nejsou vhodné pro kombinaci s podkovami Duplo.

VAROVÁNÍ Během používání zajistěte bezpečné uchycení v podkově. Položka může plnit svou funkci pouze tehdy, je-li správně nasazena a ošetřena.

Při nesprávném použití hrozí riziko sklouznutí podložky na podkově nebo hromadění nečistot mezi podkovou a podložkou.



2.12. Rizika při opětovném použití použité podkovy

POZNÁMKA Pokud je kovové jádro podkovy již viditelné v důsledku extrémního oděru, obecně nedoporučujeme podkovu k dalšímu kování.

Konečné rozhodnutí je na podkováři.

VAROVÁNÍ Před překováním je nezbytné, aby byla podkova srovnána.

Pokud byla podkova během předchozího podkování deformována, mohlo by to vést k napětí a tlaku na podrážku.

POZOR Vezměte prosím na vědomí, že použitá podkova má mírně odlišné prokluzování než nová podkova – podobně jako použitá zimní pneumatika na autě.

Věnujte také pozornost hloubce profilu podkovy.

V případě pochybností byste se vždy měli rozhodnout pro novou podkovu.

NEBEZPEČÍ Pokud chcete znovu použít samolepící podkovu, musíte z nalepených úchytů odstranit zbytky starého lepidla. Zbytky starého lepidla by měly negativní vliv na nový lepený spoj.

Upozorňujeme, že brusný prach z lepidla představuje značné zdravotní riziko. Vždy se chraňte osobními ochrannými prostředky a používejte dostatečné větrání.



3. Každodenní používání našich produktů: Informace pro jezdce a majitele koní během období kování

- POZNÁMKA** Podkovy Duplo jsou rozsáhle testovány. Jsou vhodné pro mnoho různých koní a disciplín.
- Někteří koně však s podkovami Duplo nesouhlasí kvůli poloze končetin nebo způsobu jejich pohybu.
- Je odpovědností jezdce/majitele koně, aby se vždy kriticky podíval na koně a typ podkovy.
- Pokud máte pocit, že si váš kůň s podkovou z jakéhokoli důvodu nerozumí, kontaktujte prosím svého podkováře.
- Náš tým vám také rád poradí. Upozorňujeme však, že nemůžeme stanovovat žádné vzdálené diagnózy.

3.1. Pravidelná kontrola ochrany kopyt

- OOP !!!** Ujistěte se, že máte vhodné osobní ochranné prostředky.

Používejte vhodné rukavice, abyste se vyhnuli řezným poraněním.



- POZNÁMKA** Jednou denně a před každou aktivitou s koněm kontrolujte správné a bezpečné usazení podkov Duplo a používaného příslušenství, abyste zabránili ztrátě podkovy během pravidelného období kování.

Toto platí pro všechny typy podkov (přibíjené, lepené, lité).

- POZOR** Abyste předešli zraněním, kontrolujte alespoň jednou týdně...

... zda podkova nemá ostré hrany.

... zda na přibíjených podkovách nejsou otevřené nýty.

... zda jsou v případě nalepených podkov neporušené lepené spojení mezi manžetami a kopytem a svarový šev mezi podkovou a manžetami.

... zda je kastovací bandáž na podkovách neporušená a zda nejsou odhaleny žádné ostré hroty háčků.



3.2. Pravidelná péče o kopyta

OOP !!! Ujistěte se, že máte vhodné osobní ochranné prostředky.
Používejte vhodné rukavice, abyste se vyhnuli poraněním.

3.2.1. Rizika způsobená cizími předměty pod kopytem / ochranou kopyta

OZNÁMENÍ Pravidelné čištění kopyt je nezbytné pro udržení zdraví koně, a to i v případě, že je podkovan.




VAROVÁNÍ Vždy se může stát, že se pod kopytem zaklíní větší kameny, nebo že se i přes veškerá opatření a integrovaný límec v zimě může shluknout nebezpečný led a sníh.

3.2.2. Rizika spojená se složkami produktů péče o pleť

OOP !!! Mnoho produktů pro péči o kopyta vyžaduje osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice a ochrana úst a očí. Kromě toho vždy zajistěte dostatečné větrání.



VAROVÁNÍ Přečtěte si a dodržujte varování a bezpečnostní pokyny výrobce použitého produktu.

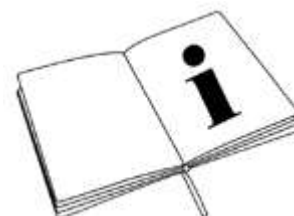

3.2.3. Vhodná rychlost a styl jízdy

UPOZORNĚNÍ Klouzavost podkov Duplo na kluzkém povrchu (např. čerstvě posečené louky, mokré listí) přibližně odpovídá kluzkosti nepodkovaného kopyta nebo opotřebované běžné podkovy bez hrotů.

Vždy musíte přizpůsobit rychlost a styl jízdy povrchu a přiměřeně snížit rychlost, abyste předešli nehodám.

Při používání podkov Duplo na kluzkém povrchu byste měli použít ozuby nebo hroty, které koni zajistí ještě lepší přilnavost.



3.4. Použití hrotů a ozubů

ODKAZ

Viz také oddíly 2.8. a 2.9. se všemi pododdíly.

UPOZORNĚNÍ

Mikroozuby a ozuby mohou představovat riziko pro stádo, zejména u koní, kteří bývají agresivní. Pokud se nestaráte o svépomocí, je proto nezbytné, abyste se o použití hrotů a ozubů předem poradili s majitelem stáje.



VAROVÁNÍ

Použití hrotů a ozubů a sledování jejich správného usazení a celistvosti během období kování je na uvážení majitele koně/jezdce ve spolupráci s podkovářem. Denně a před každou aktivitou s koněm kontrolujte správné usazení a celistvost hrotů nebo (záslepek) ozubů a závitových vložek. Křivý ozub naznačuje, že usazení závitové vložky již není optimální.

3.5. Použití závitové podkovy bez ozubů

ODKAZ

Viz oddíl 2.8.2.

3.6. Model „Snow Edition“

VAROVÁNÍ

Model „Snow Edition“ byl speciálně vyroben pro použití ve sněhu. Předpokládáme, že model „Snow Edition“ je při použití bez dodatečné protiskluzové ochrany klouzavější než běžné modely. Důrazně nedoporučujeme jeho používání bez dodatečné protiskluzové ochrany ve formě hrotů a/nebo ozubů.



3.7. Zvýšené riziko zranění v důsledku viditelného kovového jádra

OZNÁMENÍ

Pokud je kovové jádro již viditelné v důsledku zvýšeného oděru, jsou základní funkce podkovy (ochrana kopyta a tlumení nárazů) stále zajištěny a obvykle není nutné ji okamžitě vyměňovat.

VAROVÁNÍ

Jakmile je kovové jádro viditelné, zvyšuje se riziko zranění koně i stáda. Při rozhodování o výměně podkovy je třeba vzít v úvahu chování koně. Zkontrolujte, zda podkova nemá ostré hrany. V případě pochybností se poraďte se svým podkovářem, zda je třeba podkovu vyměnit.



3.8. Model „Arizona“

POZNÁMKA Ocelový okraj podkovy „Arizona“ je jen minimálně pokryt plastem. Proto bude viditelný velmi brzy. U této speciální podkovy to není známkou zvýšeného oděru nebo opotřebení.

POZOR Vzhledem k ocelovému okraji je u podkovy „Arizona“ riziko zranění vyšší než u našich ostatních podkov.



ODKAZ Viz také kapitola 3.7. ohledně viditelného kovového jádra nebo oděru u podkovy „Arizona“.

3.9. Poznámky k ortopedickým/terapeutickým a laminitis podkovám

POZNÁMKA Pokud váš podkovář používá naše produkty k ortopedickému/terapeutickému podkování nebo např. k podkování při laminitidě, vezměte prosím na vědomí, že naše produkty nejsou určeny k diagnostice ani léčbě onemocnění. Nicméně cílené použití kompozitní podkovy po konzultaci s podkovářem a/nebo veterinářem, například jako součást terapeutického podkování, může podpořit proces rekonvalescence, např. v případě laminitidy.



VAROVÁNÍ Většina podkov je v zásadě vhodná i jako jezdecké podkovy. To platí i pro podkovy s otevřenou špicí, které se často používají jako podkovy při laminitidě.

Výjimkou je podkova kastovaná (oddíl 3.10).

Nejsme schopni posoudit, do jaké míry je váš kůň schopen výkonu a proto se na něm může jezdit během tohoto období podkování.

Když kůň kulhá, je každému zřejmé, že se jedná o problém. Pokud je však váš kůň v této fázi citlivější na bolest pouze v určitých okamžicích nebo je prostě opatrnější, může to být například tím, že je v terénu méně jistý. Proto byste měli věnovat velkou pozornost signálům svého koně, abyste neohrozili své vlastní zdraví ani zdraví svého koně.

3.10. Poznámky ke kastované podkově

VAROVÁNÍ Kastovaná podkova je speciální forma ortopedické / terapeutické podkovy.

Není vhodná jako jezdecká bota.



Varování a bezpečnostní informace pro Duplo produkty

Verze 2 /květen 2025



. Upozorňujeme, že výše uvedené bezpečnostní pokyny nejsou vyčerpávající. Koně jsou živá a nepředvídatelná zvířata, jejichž chování je ovlivněno řadou faktorů, které nemůžeme plně předvídat a už vůbec ne plně kontrolovat.